



ADPLA sp. z o. o. ul. Agatowa 5, 82-310 Gronowo Górne

www.na-pomoc.pl

Telefon: +48 533 188 358

E-mail: sklep@adpla.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PŁYWAJĄCA PLASTIKOWA DESKA ORTOPEDYCZNA
NEPTUNE – X
DO TRANSPORTU W POZIOMIE

Użytkowanie na lądzie

Poziomy transport i unieruchomienie kręgosłupa człowieka przez 2, 3 lub 4 osoby, przy użyciu bocznych uchwytów ręcznych.

Umieść nosze na stabilnej, poziomej powierzchni obok pacjenta i ostrożnie przenieś go na nosze, zwracając szczególną uwagę na ułożenie jego kręgosłupa.

Unieruchom pacjenta i zabezpiecz go na noszach, używając 3 lub 4 pojedynczych pasów, które można zamocować na noszach na wyobrażalnej wysokości klatki piersiowej, tułowia i stóp pacjenta, lub pasów typu "pająk" / "ośmiornica", które również można przymocować do noszy.

Należy upewnić się, że pacjent jest prawidłowo przypięty do noszy.

Głowę pacjenta można unieruchomić za pomocą stabilizatora głowy, który można zamocować na noszach.

Podnoszenie noszy odbywa się przy użyciu bocznych uchwytów (każdy uchwyt powinien znajdować się po obu stronach pacjenta na wysokości tułowia). Nosze powinny być podnoszone przez 2, 3 lub 4 osoby, równomiernie rozkładając ciężar pacjenta, aby uniknąć dodatkowych urazów oraz z zachowaniem ostrożności przy przenoszeniu w pozycji poziomej, unikając jakiegokolwiek nachylenia w kierunku podłoża.

Użytkowanie w wodzie

Pacjent musi być załadowany, przypięty i zabezpieczony na noszach na takiej głębokości, na której zespół ratowniczy może pewnie stanąć na dnie, ponieważ wyporność noszy zależy od wagi poszkodowanego.

Należy dostosować pozycję pacjenta tak, aby jego usta i nos znajdowały się zawsze nad poziomem wody, aby zapobiec jego utonięciu, ponieważ wyporność noszy zależy od wagi poszkodowanego.

Nosze muszą być także stabilizowane przez zespół ratowniczy podczas przebywania w wodzie, aby zapobiec ich przewróceniu i ewentualnemu utonięciu pacjenta.

Przechowywanie i konserwacja

Nosze muszą być przechowywane w chłodnym i zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Ponadto, w miejscu przechowywania nosze muszą być chronione przed uderzeniami, nie należy na nie nakładać dodatkowego ciężaru ani dopuszczać do kontaktu z substancjami, które mogłyby spowodować uszkodzenia i zmniejszyć ich właściwości bezpieczeństwa.

Produkt należy czyścić łagodnym środkiem antyseptycznym i pozostawić do wyschnięcia.

Przed i po każdym użyciu nosze muszą być dokładnie sprawdzone pod kątem uszkodzeń lub trwałych deformacji; w przypadku ich wykrycia konieczna jest natychmiastowa wymiana noszy na nowe.

Nosze mogą być używane wyłącznie przez przeszkolony personel, który odbył specjalistyczne szkolenie dotyczące tego urządzenia. Nie mogą być używane w sposób podobny do innych produktów tego typu.

Nosze, jeśli są używane zgodnie z instrukcją obsługi, mają średni okres użytkowania wynoszący 5 lat.

Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych instrukcji użytkowania lub jeśli nosze były używane w sposób inny niż określony w instrukcji obsługi.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 200 kg

	Numer katalogowy		Unikalny identyfikator urządzenia
	Kod partii		Wyrób medyczny
	Producent		Chronić przed światłem słonecznym
	Zgodność z normami europejskimi		Data produkcji
	Zapoznać się z instrukcją obsługi		





ADPLA sp. z o. o. ul. Agatowa 5, 82-310 Gronowo Górne

www.na-pomoc.pl

Telefon: +48 533 188 358

E-mail: sklep@adpla.pl